

# EPICURE®

## VAKUM YARDIMLI YARA TERAPİ CİHAZI KULLANICI KILAVUZU



Giriş .....	1
Üretici bilgileri .....	1
Cihaz tanımı .....	2
Endikasyonlar .....	2
Kontraendikasyonlar .....	2
Hasta popülasyonu .....	2
Terapi modları .....	3
Ön bilgi – önden görünüm .....	4
Ön bilgi – arkadan görünüm .....	5
Ön bilgi – üstten ve soldan görünüm .....	6
Cihazın sabitlenmesi .....	7
Toplama kabının takılması .....	8
Ekran bilgi simgeleri .....	9
Ekran komut simgeleri .....	10
SÜREKLİ VAKUM terapi ayar ekranı .....	11
SÜREKLİ VAKUM çalışma ekranı .....	12 - 13
ARALIKLI VAKUM terapi ayar ekranı .....	14
ARALIKLI VAKUM çalışma ekranı .....	15 - 16
DUAL VAKUM terapi ayar ekranı .....	17
DUAL VAKUM çalışma ekranı .....	18 - 19
AYARLAR – SAAT TARİH ayar ekranı .....	20
AYARLAR – LİSAN SEÇİMİ ayar ekranı .....	21
AYARLAR – Terapi KAYIT ayar ekranı .....	22
UYARI – Toplama kabı takılı değil .....	23
UYARI – Toplama kabı dolu .....	24
UYARI – Vakum hattı tıkalı .....	25
UYARI – Vakum hattında kaçak .....	26
TEKNİK ÖZELLİKLER .....	27
ETİKET SEMBOL BİLGİLERİ .....	28 - 29
BAKIM – TEMİZLİK .....	30
GÜVENLİK UYARILARI .....	31

## **GİRİŞ**

Bu kullanıcı kılavuzu, EPITHERA markalı Negatif Basınçlı Yara terapi Sisteminin EPICURE modeli Terapi cihazının güvenli, etkin ve doğru kullanımını amacıyla hazırlanmıştır.

Cihaz, uzman hekimler veya yetkilendirilen diğer sağlık profesyonellerinin kullanımına yönelik tasarlanmıştır.

EPICURE Negatif Basınçlı Yara Terapi Cihazı, sadece EPITHERA markalı pansuman setleri ve toplama kapları ile kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.

## **ÜRETİCİ**

EPICURE Negatif Basınçlı Yara Terapi Cihazı, vakum yardımcı yara terapisi uygulamaları amacıyla EPİTHERA TIBBİ CİHAZLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından Türkiye’de üretilmiştir.

EPİTHERA LTD. ŞTİ. Gerekli gördüğünde cihazın tüm tasarım, yazılım ve donanım bileşenlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

## **EPİTHERA TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

ORUÇ REİS MAH. GİYİMKENT SİTESİ B42 Blok 4. SOK. NO: 38/A  
ESENLER - İSTANBUL

T: 0 212 4382711

F: 0 212 4382713

W: [epithera.com.tr](http://epithera.com.tr)

Eposta: [info@epithera.com.tr](mailto:info@epithera.com.tr)

## **CİHAZ TANIMI**

EPİCURE, tüm akut ve kronik yaraların ve yanık yaralarının, dünyaca kabul görmüş “Negatif Basıncılı Yara terapisi” prosedürlerine uygun kullanılmak üzere tasarlanan bir cihazdır. Kendisine uygun olarak tasarlanmış pansuman setleri ve toplama kaplarıyla birlikte, yara yatağında istenen ortamı sağlayarak, hızlı ve etkin iyileşmeyi sağlar.

Cihaz 93/42/AT, 93/42/EEC tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında, EN ISO 13485-2016 direktifleri doğrultusunda üretilmiş, CE 2292 belgesine sahiptir.

## **ENDİKASYONLAR**

Negatif Basıncılı Yara terapisi; akut, kronik, dehisce, travmatik yaralarda, diyabetik bası ve venöz staz ülserlerinde, açılmış insizyonlarda, greftler ve fleplerde, abdominal yaralarda, 2. ve 3. derece yanıklarda, hızlı ve etkin bir iyileşme süreci için gerekli yara ortamını sağlamaktadır .

## **KONTRENDİKASYONLAR**

Nekrotik dokulu yaralar, terapi edilmemiş osteomyelit, açığındaki arterler, venlerde kontrendikedir.

## **HASTA POPULASYONU**

Tüm yaş gruplarında kullanıma uygundur.

# TERAPİ MODLARI



Sürekli vakum terapi, yara pansumanına terapi süresi boyunca sabit bir değerde vakum uygulayarak iyileşmeyi destekleyen terapi yöntemidir. Cihaz, hekim tarafından öngörülen vakum değerine ayarlanır ve terapi bitirilinceye kadar yara pansumanını belirlenen negatif basınç değerinde tutar.



Aralıklı vakum terapi, adından da anlaşılacağı gibi, yara pansumanına belirlenen zaman aralıklarında negatif basınç uygulanan terapi yöntemidir. Terapi başlatılmadan önce Terapi için belirlenen vakum değeri, vakum uygulama süresi ve bekleme süresi girilerek cihaz çalıştırılır. Cihaz, terapi bitirilinceye kadar vakum uygulama ve bekleme döngüsünün belirlenen süreler göre tekrarlanmasını sağlar.



Dual vakum terapi, yara pansumanına iki farklı değerde vakum uygulanan terapi yöntemidir. Terapi başlatılmadan önce uygulanacak yüksek ve düşük vakum değerleri ve uygulanacakları süreler girilerek cihaz çalıştırılır. Cihaz, terapi bitirilinceye kadar belirlenen süreler dahilinde yüksek vakum – düşük vakum döngüsünün tekrarlanmasını sağlar.

# ÖN BİLGİ


## EPICURE önden görünüm



# ÖN BİLGİ

## EPICURE arkadan görünüm

HORTUM BAĞLANTISI


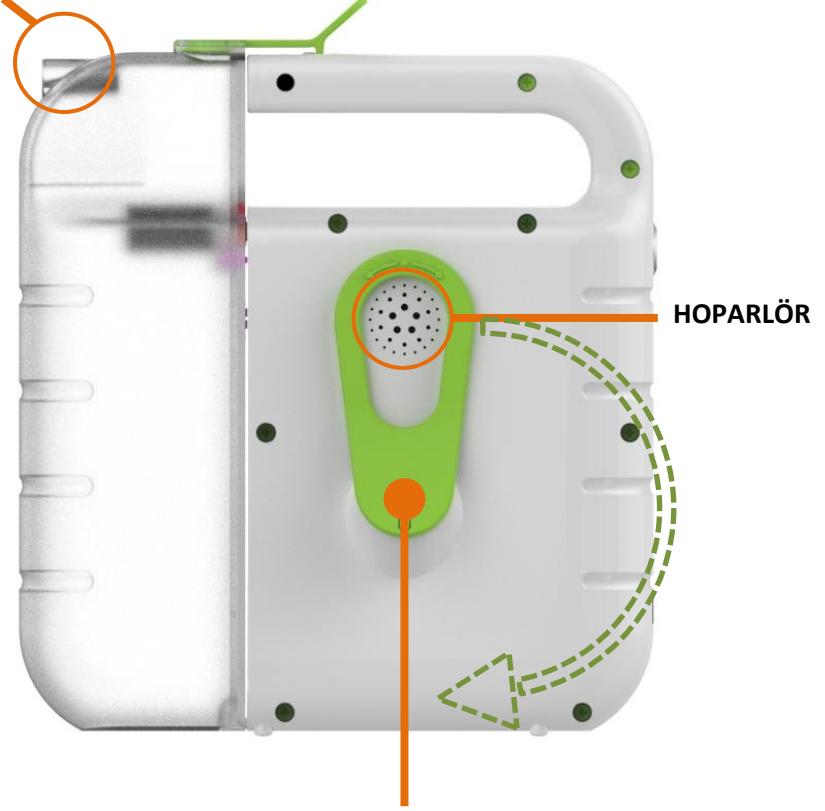


HOPARLÖR

MASA ÜSTÜ KULLANIM  
DAYANAĞI (360°)

# ÖN BİLGİ

## EPICURE üstten ve soldan görünüm

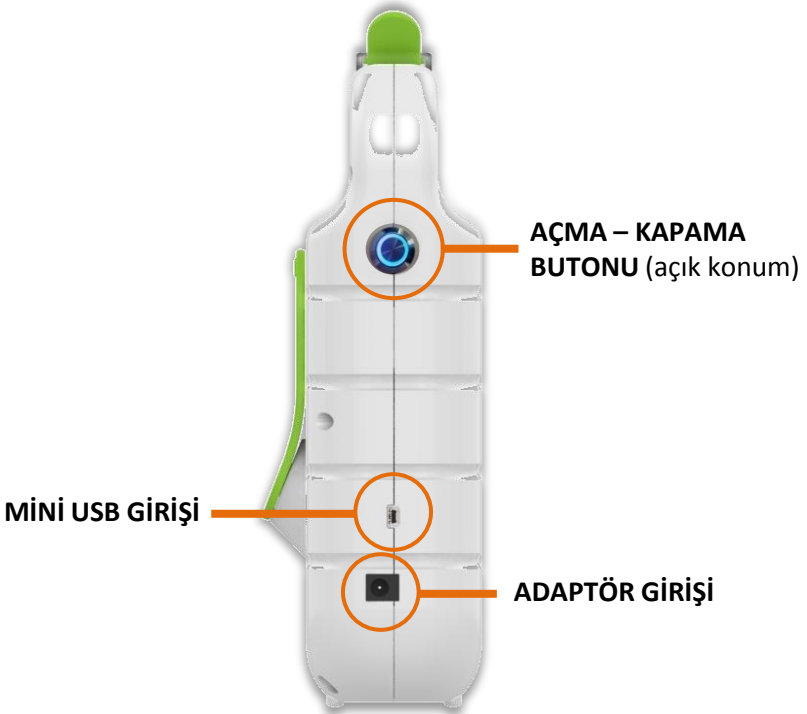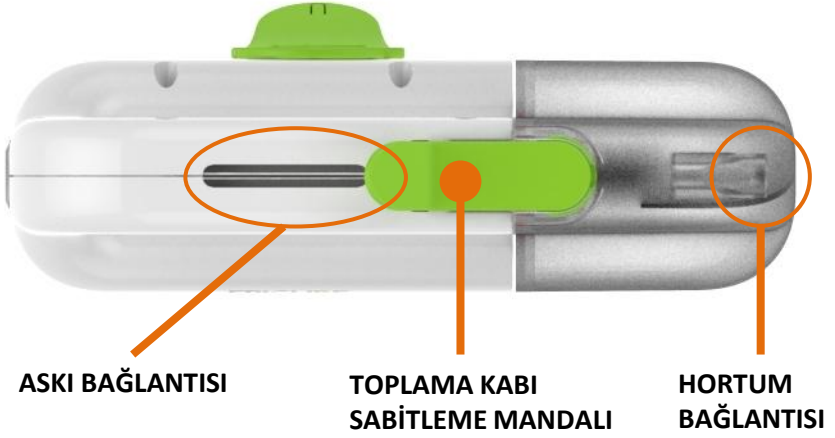



## CİHAZIN SABİTLENMESİ

- 1 Serum askısı / yatak başı vb. yatay konumda olan kola cihazın üst kısmında yer alan **örgü askı bandı** ile sabitleyebilirsiniz.



- 2 Arka kısımda bulunan yeşil dayanağı (360' dönebilir) aşağı istikamette çevirerek masa üstü konumuna getirebilirsiniz.



## TOPLAMA KABININ TAKILMASI

- 1 Toplama kabının alt tarafındaki sabitleme yuvasını cihazdaki karşılığına oturtunuz.



SABİTLEME YUVASI

- 2 Toplama kabını sabitleme mandalının KLİK sesini duyana kadar ok yönünde itiniz.



# EKRAN BİLGİ SİMGELERİ



**SÜREKLİ VAKUM**



**ARALIKLI VAKUM**



**DUAL VAKUM**



**LİSAN SEÇİMİ**



**SAAT – TARİH AYARI**



**TERAPİ GEÇMİŞİ KAYDI**



**15.30.23**

**TERAPİ SÜRESİ**



**15.09.2**  
**15.30.2**

**ANLIK TARİH - SAAT**



**PİL SARJ GÖSTERGESİ**


# EKRAN KOMUT SİMGELERİ



SÜREKLİ VAKUM TERAPİ MODU



ARALIKLI VAKUM TERAPİ MODU

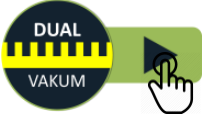

DUAL VAKUM TERAPİ MODU



AYARLAR



MENÜ



BAŞLAT



GERİ



BİTİR



DURAKLAT



KAYDET



Ekran komut simgelerine dokunduğunuzda simgeler **SARI** ya dönüşecek ve **AKTİF** olacaktır.





Ekran 30 saniye işlem yapılmadığında ekran koruması aktif olacaktır. Ekran tekrar dokunulduğunda devre dışı kalacaktır.

# SÜREKLİ VAKUM TERAPİ MODU





## AÇILIŞ > SÜREKLİ VAKUM AYAR EKRANI


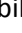


SÜREKLİ VAKUM modunu başlatmak için simgesine  dokununuz, simgedeki ok  sarı renge dönüşerek aktif olacaktır.



Terapi için belirlenen vakum değerini giriniz. Vakum değerini  simgesi ile yükseltebilir,  simgesi ile azaltabilirsiniz. **\* Ekran açıldığında konvansiyonel / sık tercih edilen vakum değeri -125 mmHg görünecektir, Terapi reçetesinde yer alan negatif basınç değerlerini uygulayınız.**



BAŞLAT  simgesine dokunarak terapiyi başlatabilirsiniz. Simgedeki ok  sarı renge dönüşecektir.



## AÇILIŞ > SÜREKLİ VAKUM AYAR EKRANI > SÜREKLİ VAKUM ÇALIŞMA EKRANI

Cihaz terapiye başladığında çalışma ekranı görünecektir. terapiye ilişkin parametreleri buradan izleyebilir, gerektiğinde terapiyi duraklatabilir veya bitirebilirsiniz.



GERİ simgesine dokunarak bir önceki ekran sayfasına dönebilirsiniz.



DURAKLAT simgesi ile devam edecek olan ekran sayfaları için ÇALIŞMA EKRANI sayfasına bakabilirsiniz. Sayfa: 13




BİTİR simgesi ile devam edecek olan ekran sayfaları için ÇALIŞMA EKRANI sayfasına bakabilirsiniz. Sayfa: 13

# SÜREKLİ VAKUM ÇALIŞMA EKRANI



AÇILIŞ > SÜREKLİ VAKUM AYAR EKRANI > ÇALIŞMA EKRANI

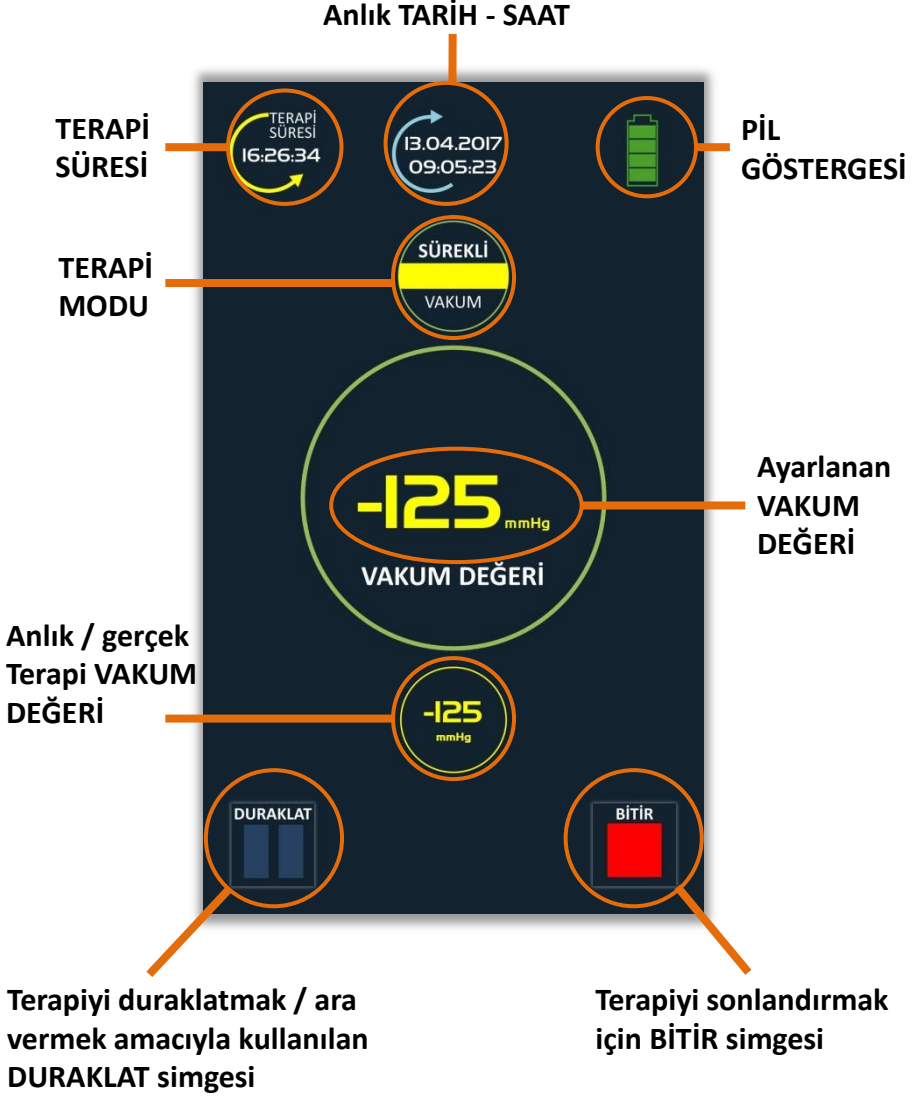

# SÜREKLİ VAKUM ÇALIŞMA EKRANI



## AÇILIŞ > SÜREKLİ VAKUM AYAR EKRANI > ÇALIŞMA EKRANI



Terapi çalışma ekranında DURAKLAT komutu verdiğinizde gelen ekranda diğer komut simgeleri çıkacaktır.

GERİ simgesi ile terapinin seçildiği mod ayar ekranına yönlendirileceksiniz. Terapiye ait değerleri değiştirebilir veya aynı değerlerden devam edebilirsiniz.

MENÜ simgesi ile ANA MENÜ ekranına yönlendirileceksiniz. Tercih edilen Terapi modunu seçebilir, devamında Terapi değerlerini girerek başlatabilirsiniz.

BAŞLAT simgesi ile terapiye duraktığınız moddan devam edebilirsiniz.

BİTİR simgesi ile terapiyi bitirebilirsiniz. Uyarı olarak size ONAY vermeniz istenecektir. EVET ile Terapi sonlandırılacak ve ANA MENÜ sayfası çıkacaktır. HAYIR ile Terapi çalışma ekranı çıkacak ve terapiye duraklatılan moddan devam edecektir.



# ARALIKLI VAKUM TERAPİ MODU



## AÇILIŞ > ARALIKLI VAKUM AYAR EKRANI



ARALIKLI VAKUM modunu başlatmak için ► simgesine dokununuz, simgedeki ► ok sarı renge dönüşerek aktif olacaktır.



Terapi için belirlenen vakum değerini, vakum süresini ve bekleme süresini (dakika) giriniz. Vakum değerini + simgesi ile yükseltebilir, - simgesi ile azaltabilirsiniz.



BAŞLAT simgesine dokunarak terapiyi başlatabilirsiniz. Butondaki ok simgesi sarı renge dönüşecektir.



## AÇILIŞ > ARALIKLI VAKUM AYAR EKRANI > ARALIKLI VAKUM ÇALIŞMA EKRANI

Cihaz terapiye başladığında ekran soldaki şekildeki gibi görünecektir. terapiye ilişkin parametreleri buradan izleyebilir, gerektiğinde terapiyi duraklatabilir veya bitirebilirsiniz.



GERİ simgesine dokunarak bir önceki ekran sayfasına dönebilirsiniz.



DURAKLAT simgesi ile devam edecek olan ekran sayfaları için ÇALIŞMA EKRANI sayfasına bakabilirsiniz. Sayfa: 16




BITİR simgesi ile devam edecek olan ekran sayfaları için ÇALIŞMA EKRANI sayfasına bakabilirsiniz. Sayfa: 16



# ARALIKLI VAKUM ÇALIŞMA EKRANI



AÇILIŞ > ARALIKLI VAKUM AYAR EKRANI > ÇALIŞMA EKRANI

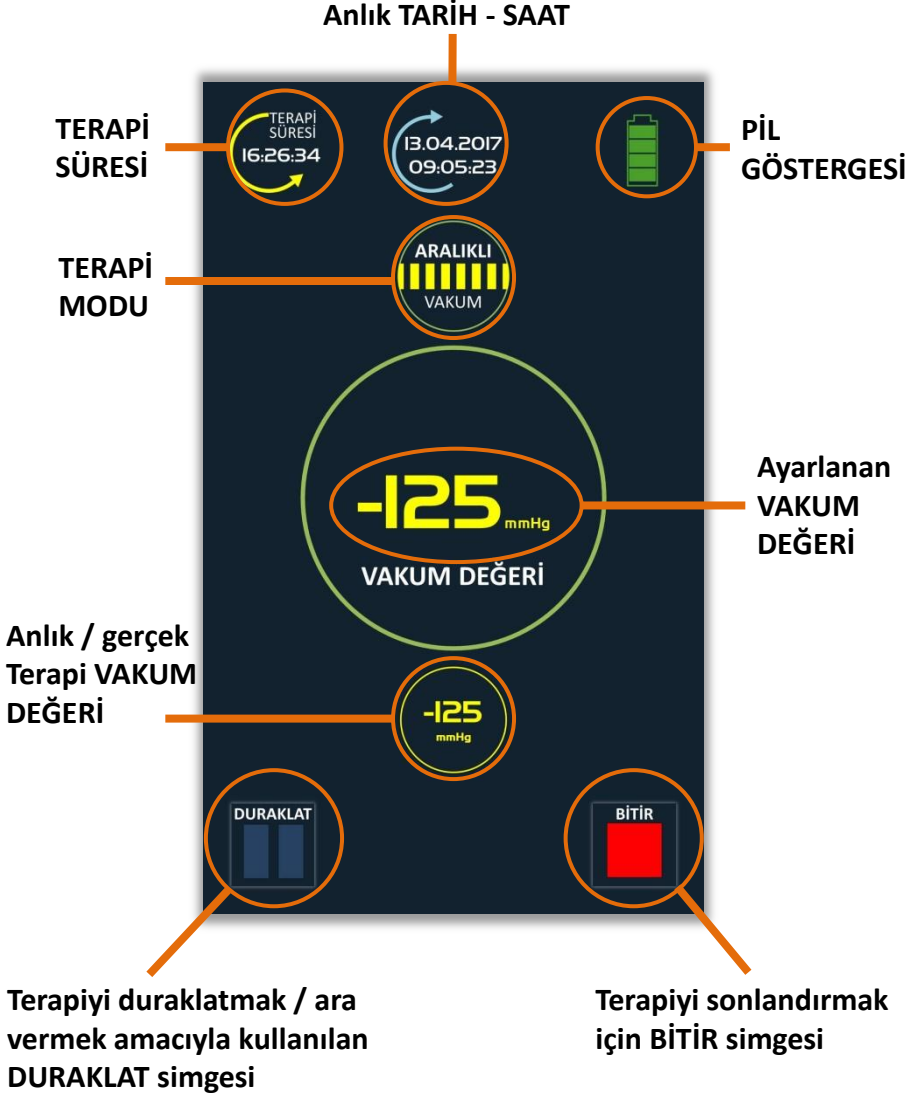

# ARALIKLI VAKUM ÇALIŞMA EKRANI



## AÇILIŞ > ARALIKLI VAKUM AYAR EKRANI > ÇALIŞMA EKRANI



Terapi çalışma ekranında DURAKLAT komutu verdiğinizde gelen ekranda diğer komut simgeleri çıkacaktır.

GERİ simgesi ile terapinin seçildiği mod ayar ekranına yönlendirileceksiniz. Terapiye ait değerleri değiştirebilir veya aynı değerlerden devam edebilirsiniz.

MENÜ simgesi ile ANA MENÜ ekranına yönlendirileceksiniz. Tercih edilen Terapi modunu seçebilir, devamında Terapi değerlerini girerek başlatabilirsiniz.

BAŞLAT simgesi ile terapiye duraklattığınız moddan devam edebilirsiniz.

BİTİR simgesi ile terapiyi bitirebilirsiniz. Uyarı olarak size ONAY vermeniz istenecektir. EVET ile Terapi sonlandırılacak ve ANA MENÜ sayfası çıkacaktır. HAYIR ile Terapi çalışma ekranı çıkacak ve terapiye duraklatılan moddan devam edecektir.



# DUAL VAKUM TERAPİ MODU



## AÇILIŞ > DUAL VAKUM AYAR EKRANI



DUAL VAKUM modunu başlatmak için ► simgesine dokununuz, simgedeki ► ok sarı renge dönüşerek aktif olacaktır.



Terapi için belirlenen YÜKSEK ve DÜŞÜK vakum değerlerini ardından bekleme sürelerini (dakika) giriniz. Vakum değerini + simgesi ile yükseltebilir, - simgesi ile azaltabilirsiniz.



BAŞLAT ► simgesine dokunarak terapiyi başlatabilirsiniz. Butondaki ok simgesi sarı renge ► dönüşecektir.



## AÇILIŞ > ARALIKLI VAKUM AYAR EKRANI > ARALIKLI VAKUM ÇALIŞMA EKRANI

Cihaz terapiye başladığında ekran soldaki şekildeki gibi görünecektir. terapiye ilişkin parametreleri buradan izleyebilir, gerektiğinde terapiyi duraklatabilir veya bitirebilirsiniz.



GERİ simgesine dokunarak bir önceki ekran sayfasına dönebilirsiniz.



DURAKLAT simgesi ile devam edecek olan ekran sayfaları için ÇALIŞMA EKRANI sayfasına bakabilirsiniz. Sayfa: 19




BITİR simgesi ile devam edecek olan ekran sayfaları için ÇALIŞMA EKRANI sayfasına bakabilirsiniz. Sayfa: 19

# DUAL VAKUM ÇALIŞMA EKRANI



AÇILIŞ > DUAL VAKUM AYAR EKRANI > ÇALIŞMA EKRANI

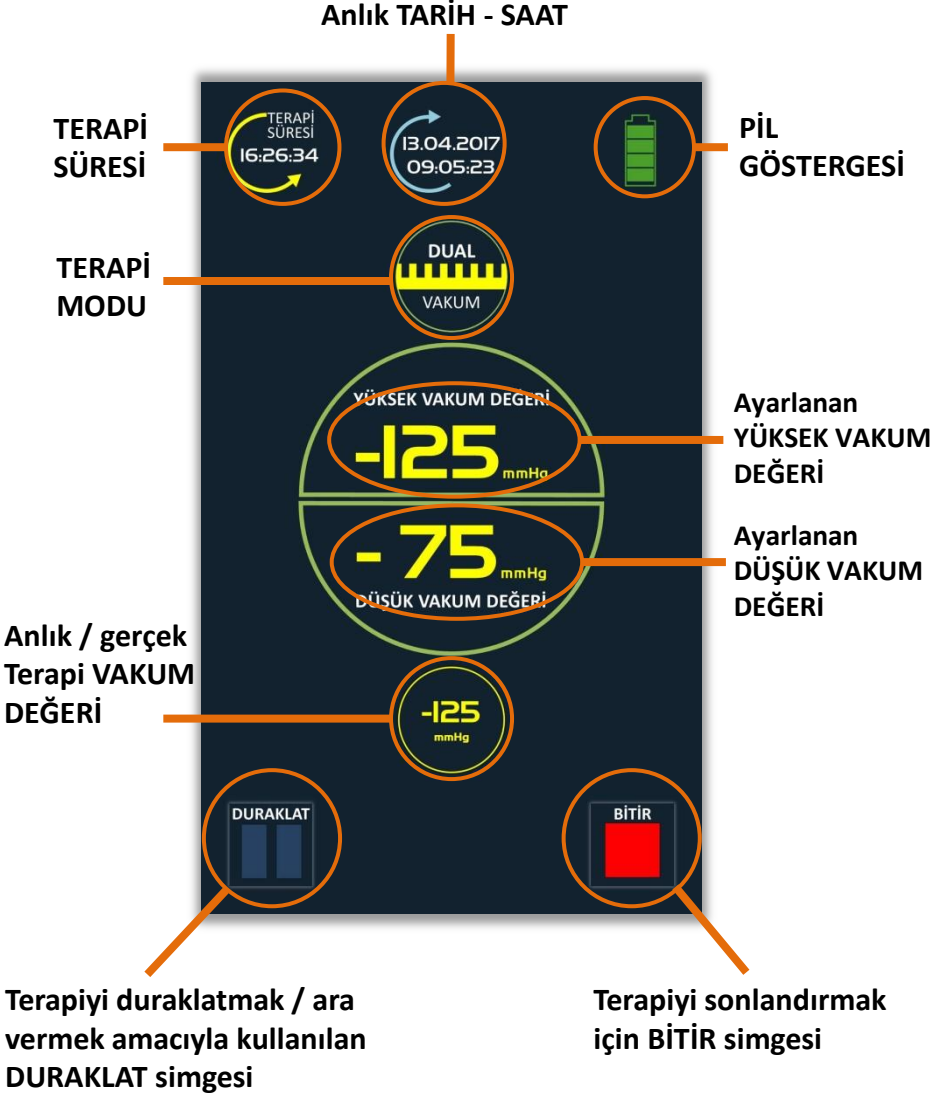

# DUAL VAKUM ÇALIŞMA EKRANI



## AÇILIŞ > DUAL VAKUM AYAR EKRANI > ÇALIŞMA EKRANI



Terapi çalışma ekranında DURAKLAT komutu verdiğinizde gelen ekranda diğer komut simgeleri çıkacaktır.

GERİ simgesi ile terapinin seçildiği mod ayar ekranına yönlendirileceksiniz. Terapiye ait değerleri değiştirebilir veya aynı değerlerden devam edebilirsiniz.



MENÜ simgesi ile ANA MENÜ ekranına yönlendirileceksiniz. Tercih edilen Terapi modunu seçebilir, devamında Terapi değerlerini girerek başlatabilirsiniz.



BAŞLAT simgesi ile terapiye duraklattığınız moddan devam edebilirsiniz.





BİTİR simgesi ile terapiyi bitirebilirsiniz. Uyarı olarak size ONAY vermeniz istenecektir. EVET ile Terapi sonlandırılacak ve ANA MENÜ sayfası çıkacaktır. HAYIR ile Terapi çalışma ekranı çıkacak ve terapiye duraklatılan moddan devam edecektir.






## AÇILIŞ > AYARLAR > SAAT TARİH AYAR EKRANI



SAAT ve TARİH ayarı için  simgesine dokununuz. butondaki ok simgesi sarı renge  dönüşecektir.

Cihaz ayar düzenlemeleri için ayarlar  simgesine dokununuz.



Anlık TARİH – SAAT ayarlarını giriniz.



KAYDET simgesi ile SAAT – TARİH değerlerini kaydediniz.

# AYARLAR – LİSAN SEÇİMİ


AYARLAR




## AÇILIŞ > AYARLAR > LİSAN SEÇİMİ AYAR EKRANI



LİSAN tercihi için ok simgesine dokununuz

Cihaz ayar düzenlemeleri için ayarlar  simgesine dokununuz.

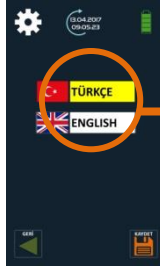

LİSAN tercihi için TÜRKÇE – İNGİLİZCE tercihinizi yapınız.




KAYDET simgesi ile LİSAN tercihinizi kaydediniz.

# AYARLAR – TERAPİ GEÇMİŞ KAYIT EKRANI

AYARLAR



## AÇILIŞ > AYARLAR > TERAPİ GEÇMİŞ KAYIT EKRANI

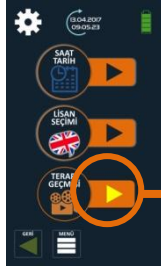

Terapi GEÇMİŞ KAYDI almak için ok simgesine dokununuz


Cihaz ayar düzenlemeleri için ayarlar simgesine dokununuz.



KAYIT için Terapi başlangıç tarihini ve bitiş tarihlerini giriniz.



İLERİ simgesi ile terapi geçmiş görüntüleyiniz.

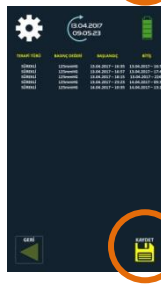

Ekranda, girilen tarih aralıklarında uygulanan terapi kayıtları listlenecektir. KAYDET simgesi ile Terapi KAYDINI harici belleğe aktarabilirsiniz.



# UYARI ÇÖZÜMLERİ

## TOPLAMA KABİ TAKILI DEĞİL



Uyarı ALARM sesini simgeye dokunarak SESSİZ konuma getiriniz.



Toplama kabının yuvaya doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz.



Uyarıya neden olan hata giderildikten sonra terapiye devam edebilirsiniz.



Tercihinize göre MENÜ simgesi ile Terapi başlangıcına dönebilirsiniz.

# UYARI ÇÖZÜMLERİ

## TOPLAMA KABI DOLU



Uyarı ALARM sesini simgeye dokunarak SESSİZ konuma getiriniz.



Toplama kabını yenisi ile değiştiriniz.



Uyarıya neden olan hata giderildikten sonra terapiye devam edebilirsiniz.




Tercihinize göre MENÜ simgesi ile Terapi başlangıcına dönebilirsiniz.

# UYARI ÇÖZÜMLERİ

## VAKUM HATTI TIKALI



Uyarı ALARM sesini simgeye dokunarak SESSİZ konuma getiriniz.

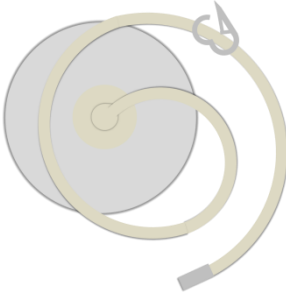

Vakum hortumu TIKALI veya KATLANMIŞ olabilir. Kontrol ediniz.



Uyarıya neden olan hata giderildikten sonra terapiye devam edebilirsiniz.




Tercihinize göre MENÜ simgesi ile Terapi başlangıcına dönebilirsiniz.

# UYARI ÇÖZÜMLERİ

## VAKUM HATTINDA KAÇAK



Uyarı ALARM sesini simgeye dokunarak SESSİZ konuma getiriniz.

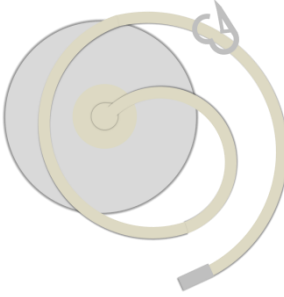

Pansumani, vakum portunu ve hortum bağlantılarını kontrol ediniz.



Uyarıya neden olan hata giderildikten sonra terapiye devam edebilirsiniz.



Tercihinize göre MENÜ simgesi ile Terapı ibazlangıcına dönebilirsiniz.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- **BOYUTLAR:** 216mm. (Y) x 135mm. (G) x 70mm. (D)
- **AĞIRLIK:** 955 GR.
- **DAHİLİ BATARYA:** Power Extra - 6V Lityum polimer / 4950 mA/h
- **HARİCİ BESLEME:** 220 VAC - 6 VDC adaptör
- **MONİTÖR:** 5" TFT / Dokunmatik ekran / Çözünürlük.: 800x400
- **VAKUM POMPASI:** 6 VDC / MEMBRANLI
- **SES:** <45 dB
- **SESLİ UYARI:** Hoparlör
- **GÖRSEL UYARI:** Açıklamalı ekran arayüzü
- **ÇALIŞMA SÜRELERİ:** AC sürekli, dahili batarya 8 saat min.
- **VAKUM DEBİSİ:** 6 lt. /dk. max.
- **VAKUM TERAPİ ARALIĞI:** -5 mmHg /-300 mmHg
- **TERAPİ MODLARI:** Sürekli vakum, Aralıklı vakum, Dual vakum

# ÜRÜN ETİKET SEMBOL BİLGİLERİ

EN 15223-1: 2018 Standardına Göre Hazırlanmış Sembol ve Anlamları



ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI



ETİLEN OKSİT İLE STERİL EDİLMİŞTİR.



İKİNCİ KEZ STERİLİZASYON İŞLEMİNE TABİ TUTMAYINIZ.



İKİNCİ KEZ KULLANMAYINIZ.



PAKET HASARLI İSE KULLANMAYINIZ.



KULLANMA KILAVUZUNA BAKINIZ.



ÜRETİCİ BİLGİLERİ.



ÜRETİM TARİHİ.



REFERANS NUMARASI.



PARTİ ÜRETİM NUMARASI.



BARKOD NUMARASI.

# ÜRÜN ETİKET SEMBOL BİLGİLERİ

EN 15223-1: 2018 Standardına Göre Hazırlanmış Sembol ve Anlamları



SON KULLANMA TARİHİ.



SU İLE TEMASTAN UZAK TUTUNUZ.



28

GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ BIRAKMAYINIZ.



25 °C

SICAKLIK SINIRI



DİKKAT



(WEEE) ELEKTRONİK (ATIK evsel atığa atmayınız)



TİP B (Hasta bağlantısı tıbbi cihaz sınıfı)



SINIF II (Elektriksel korunurluk)

## BAKIM

**!** Her kullanımdan önce;

- Cihazın önceki kullanımından sonra genel temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapıp / yapılmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı ve tüm bileşenleri ile birlikte (toplama kabı, bağlantı ekipmanları) her kullanımdan önce kırık, çatlak vb. görülebilir hasarlar için kontrol ediniz.
- Herhangi bir hasar durumunda cihazı kullanmayınız. Cihazı yetkili bayi ve servise teslim ediniz.
- Cihazın rutin altı (6) aylık teknik bakımları için teknik servise gönderiniz.

## TEMİZLİK

**!** Her kullanımdan sonra;

- Cihaza bağlı bağlantı ekipmanlarını çıkartıp (hortum, klemp, toplama kabı, pansuman setleri) tıbbi atık prosedürüne uygun şekilde bertaraf ediniz.
- Cihazı, hafif nemli ve yumuşak bir bezle plastik ve dokunmatik ekrana uygun düşük dereceli deterjan ile temizliğini, ardından düşük dereceli dezenfektan ile dezenfeksiyon işlemi yapınız.
- Cihaz kasasını ve ekranı çizebilecek nitelikte veya plastik ile tepkimeye girebilecek kimyasallar içeren ürünler kesinlikle kullanmayınız.
- Cihazın tüm elektronik ve pnömatik bileşenlerinin test ve bakımları yalnızca firmamızda ve firmamız teknisyenlerin tarafından yapılmalıdır.
- Aksi davranışlar cihazın garanti şartlarını geçersiz kılmasının yanı sıra, kullanıcı ve hastalar için sağlığı tehdit edici ortamlara sebebiyet verebilirler.

**!** Tüm BAKIM ve TEMİZLİK işlemlerinde enfeksiyon riskine karşılık tıbbi eldiven kullanınız.



## GÜVENLİK UYARILARI



- EPİCURE cihazı bu kılavuzda yer alan bilgilere göre kullanılmalıdır. Aksi takdirde garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Cihaz ve pansumanların hekim reçetesine uygun şekilde, klinik hemşire veya uzman bakım personeli tarafından kullanılması zorunludur. Hasta ve / veya hasta yakınları tarafından kesinlikle kullanılmamalıdır. Aksi takdirde kullanımı yaralanmalara sebebiyet verebilir.
- Kılavuzda yer alan endikasyonlar ve kontraendikasyonlara dikkat edilmelidir.
- Cihaz sadece birlikte verilen adaptörle kullanılmalıdır. Farklı bir adaptör kullanılması cihaza ve kullanıcıya zarar verebilir.
- EPİCURE cihazında sadece EPİTHERA markalı bağlantı ekipmanları, pansuman seti ve toplama kabı kullanılabilir, farklı veya benzeş malzemelerin kullanılmaması gerekir. Aksi durumlarda cihaz garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın çalıştırılacağı veya sarj edileceği ortamdaki elektrik şebekesi uluslararası elektrik standartlarına uygun olmalıdır.
- Elektrik çarpma riskini ortadan kaldırmak için bu donanım sadece koruyucu topraklama ile birlikte bir beslenme şebekesine bağlanabilir.
- Cihazı banyo, küvet, duş teknesi vb. su ile temas edebilecek ortamlarda kesinlikle kullanmayınız.
- Tüm terapilerde cihazınızı -5 mmHg ile - 300 mmHg değerleri arasında ( -5 mmHg aralıklarla ) vakum uygulayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Ayar menüleriniz açıldığında genel kullanım alışkanlıklarını dikkate alarak verilmiş ön değerler olacaktır ( Örn. Sürekli vakum için -125 mmHg ).

**EPITHERA®**

**EPITHERA TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
ORUÇ REİS MAH. GİYİMKENT SİTESİ B42 Blok 4. SOK. NO: 38/A ESENLER - İSTANBUL  
T: 0 212 4382711 F: 0 212 4382713  
W: [epithera.com.tr](http://epithera.com.tr)  
Eposta: [info@epithera.com.tr](mailto:info@epithera.com.tr)