



1 Kapağı tüpten çıkartın.



2 Hidrojeli uygulayarak yara yatağını kaplayın.



3 Gerekirse ikincil pansuman ile sabitleyin.

Ağrısız

Jel yaraya yapışmaz, bu nedenle ikincil hasara neden olmaz.



Tip	Ref Kodu	Ağırlık
Tube	HA015	15g
	HA025	25g
Long Tube	HA015B	15g
	HA015S	15g
Syringe	HA018S	18g
	HA025S	25g

Açıklama: sözleşme düzenlemesi doğrultusunda özel özellikler.

Türkiye Distribütörü

EPITHERA

EPITHERA TIBBİ CİHAZLAR SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Oruç Reis Mah. Giyimkent 4. Sk. No: 38/A Pk: 34235

Esenler - İSTANBUL T: +90 212 4382711

E: luofucon@epithera.com.tr

FORYOU MEDICAL

HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD

HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD.

ADD: No.1, Shangxia North Road, Dongjiang Hi-tech Industrial Park, Huizhou, Guangdong, China

TEL: +86-752-5302185 FAX: +86-752-5302088 E-MAIL: medical2@foryougroup.com

en.foryoumedical.com

FORYOU MEDICAL
for you, for us, for life

LUOFUCON®

Amorf Hidrojel



Rev: 03/2020A/0

FORYOU MEDICAL
for you, for us, for life



LUOFUCON® Amorf Hidrojel



Yara iyileşme sürecini kolaylaştırmak için nazik amorf bakım.



LUOFUCON® Amorf Hidrojel Yara Örtüsü, üstün performansa sahip renksiz, şeffaf bir jeldir. Yaradaki fazla eksüdayı emebilir, nemli ortamı koruyarak epitelizasyonu kolaylaştırabilir ve iyileşme süresini azaltabilir. Jel, yaraya yapışmaz, ikincil hasara neden olmaz. Lokal uygulamalar için uygundur ve ağrıyı hafifletmede faydalıdır. Jel, nekrotik dokuyu nazikçe yeniden nemlendirerek otolitik debridmanı kolaylaştırır. Propilen glikol ve yoğun miktarda su içeriği sayesinde kurumuş ortamların nemlenmesine, akıntılı ortamlardaysa eksüdanın emilmesine imkân tanır. Böylece jel, yara iyileşmesi için elverişli olan nemli bir yara yönetim ortamı oluşturabilir.

- Kara yara
- Kırmızı yara
- Sarı yara
- D: Debridman
- M: Nem Dengesi

Endikasyonlar

LUOFUCON® Amorf Hidrojel Yara Örtüsü, nekrotik dokuyu yeniden hidratlamak ve otolitik debridmanı kolaylaştırmak için kullanılır, hassas granülasyon dokusuna zarar vermeden eksüdayı emer:

- Venöz ülserler (bacak ülserleri)
- Yatak yaraları
- Diyabetik Ayak Ülserleri
- Kavite veya sinüs yaraları
- Yanıklar (I° ve II°)

Kontrendikasyonlarda bahsedilen yaralar hariç, farklı türdeki yaraların tüm iyileşme aşamaları.

Kontrendikasyonlar

Sadece harici kullanım için, III° yanıklarda kullanılamaz.

Amorf Hidrojel

- Yoğun su içerir
- Nekrotik dokuyu nazikçe yeniden nemlendirir
- Değiştirmesi kolay
- Otolitik debridmanı kolaylaştırır
- Nemli bir yara yönetimi ortamı oluşturur



Faydaları

- Kolay ve doğru yara değerlendirmesi için kristal berraklığında şeffaflık.
- Hidrasyon dengesini koruyarak yara iyileşmesine uygun nemli ortamı sağlamak.
- Yarada otolitik debridmanı teşvik etmek.
- Serinletmek ve yara ağrısını yatıştırmak.
- Kaviteli ve tünel yaralar vb. her durumda kolay uygulama.



Nem Dengesi

Daha iyi bir nemli yara ortamı için nem salıverme ve eksüdayı emme bir arada.

Kolay Gözlem

Yara durumunun kolay gözlenmesi için kristal berraklığında şeffaflık.

