



1 Debridmandan sonra uygun ölçüde yara örtüsünü seçin.



2 Yara örtüsünü doğrudan yara üzerine uygulayın.



3 Gerekirse pansumanı uygun bandaj veya bant ile sabitleyin.



Tip	Ref Kodu	Ölçü (cm)	Ölçü (in)
Non-Border	SF050050N	5 x 5	2" x 2"
	SF075075N	7.5 x 7.5	3" x 3"
	SF100100N	10 x 10	4" x 4"
	SF150150N	15 x 15	6" x 6"
	SF200130NH	20 x 13 (Heel)	8" x 5.2" (Heel)
	SF076076NX	Φ7.6 (TracheostomyΦ0.8)	Φ3.04" (TracheostomyΦ0.32")
SF100090NX	10 x 9 (TracheostomyΦ1.2)	4" x 3.6" (TracheostomyΦ0.48")	
With-Border	SF050050F	5 x 5 (2.5 x 2.5)	2" x 2" (1" x 1")
	SF100100F	10 x 10 (6.2 x 6.2)	4" x 4" (2.48" x 2.48")
	SF150150F	15 x 15 (10.5 x 10.5)	6" x 6" (4.2" x 4.2")
	SF200100F	20 x 10 (15 x 5)	8" x 4" (6" x 2")
	SF175170FS	17.5 x 17 (12.5 x 12) (Sacrum)	7" x 6.8" (5" x 4.8") (Sacrum)
	SF230230FS	23 x 23 (17 x 16.5) (Sacrum)	9.2" x 9.2" (6.8" x 6.6") (Sacrum)
SF210210FH	21 x 21 (16.5 x 15.5) (Sacrum)	8.4" x 8.4" (6.6" x 6.2") (Sacrum)	
SF250235FH	25 x 23.5 (19 x 17.5) (Heel)	10" x 9.2" (7.6" x 7") (Heel)	
Lite-Border	SF075075L3	7.5 x 7.5 (4.5 x 4.5)	3" x 3" (1.8" x 1.8")
	SF100100L3	10 x 10 (6.2 x 6.2)	4" x 4" (2.48" x 2.48")
	SF200100L3	20 x 10 (15 x 5)	8" x 4" (6" x 2")

Açıklama: sözleşme düzenlemesi doğrultusunda özel özellikler.

FORYOU MEDICAL
HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD

HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD.
ADD: No.1, Shangxia North Road, Dongjiang Hi-tech Industrial Park, Huizhou, Guangdong, China
TEL: +86-752-5302185 FAX: +86-752-5302088 E-MAIL: medical2@foryougroup.com
en.foryoumedical.com

LUOFUCON®

Silikon Köpük Yara Örtüsü



Rev: 03/2020/A/0

FORYOU MEDICAL
for you, for us, for life

Türkiye Distribütörü
EPITHERA
EPITHERA TIBBİ CİHAZLAR SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Oruç Reis Mah. Giyimkent 4. Sk. No:38/A Plk: 34235
Esenler - İSTANBUL T: +90 212 4382711
E: luofucon@epithera.com.tr

FORYOU MEDICAL
for you, for us, for life



LUOFUCON®

Silikon Köpük Yara Örtüsü



Orta ila çok eksüdalı yaralarda kullanım için üstün kapasiteye sahip yara örtüsü.



- Kırmızı yara
- Sarı yara
- Pembe yara
- M: Nem Dengesi

OptiSil teknolojisine sahip yumuşak silikon yara temas tabakası, süper emici ped tabaka ve buhar geçirgen, su geçirmez bir filmden oluşan LUOFUCON® Silikon Köpük Yara Örtüsü, gelişmiş yara sıvı yönetimi için ideal bir pansumandır. Dinamik sıvı yönetimine olanak tanıyan çok katmanlı yapı yara iyileşmesini destekleyen, travmayı en aza indiren ve pansuman değişimlerinde ağrıyı azaltan optimum nemli yara ortamı sağlar.

Avantajları

- İçerdiği silikon jel teknolojisi, hassas ciltler için kaliteli yumuşak silikon temas yüzeyi sağlar;
- Mükemmel yara eksüdası emilimi, maserasyon ve sızıntı riskini azaltır;
- Ağrısız kaldırma ve yeniden konumlandırma, ikincil pansuman gerektirmez;
- Farklı ihtiyaçları karşılamak için özelleştirilmiş şekil tasarımı;
- Kullanım süresince bütünlüğünü korur.

Endikasyonlar

- Basınç ülserleri
- Bacak ve ayak ülserleri
- Travmatik yaralar
- Cerrahi yaralar
- Donör sahalar
- Cilt yırtılmaları
- Yanıklar (I° ve II°)

Pansuman ayrıca kuru/nekrotik yaralarda jeller ile kombine edilerek kullanılabilir.

Kontrendikasyonlar

Pansumanın içeriklerine duyarlılığı bilinen hastalarda LUOFUCON® Silikon Köpük Yara Örtüsü kullanılmayın.

Koruyucu Arka Film

Yüksek MVTR
Pürüzsüz ve esnek
Su geçirmez & bakteri bariyeri

Süper Emici Tabaka

Olağanüstü emme kapasitesi
Maserasyon riskini en aza indirmeye yardımcı olur

Nonwoven Tabaka


Sıvıyı geniş bir yüzeye yayar
Emilim performansını artırır

Emici PU Köpük

Mükemmel sıvı taşıma kapasitesi
Ekstra konfor ve basınç koruması

OptiSil Silikon Yara Temas Tabakası

Tarafımızca geliştirilen silikon jel ve perforasyon teknolojisi
Yara eksüdasını hızlı ve eşit olarak dağıtır
Nazik ve güvenli bir şekilde ağrısız çıkarma
Epidermal hücreleri soymaz

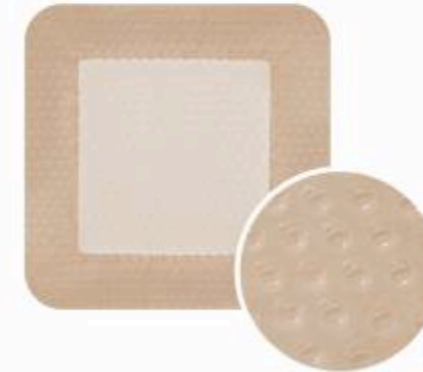

Yumuşak Yapışkan

Cildin ve yaranın düz olmayan yüzeyi ile pansuman arasında yoğun temas noktası oluşturarak eksüda sızıntısı ve maserasyonu önler, sıkı bir sızdırmazlık sağlar.

OptiSil

Tarafımızca geliştirilen silikon jel ve perforasyon teknolojisi sadece yara yüzeyine nazik bir bakım sağlamakla kalmaz, aynı zamanda eksüdanın pansumanın içine inanılmaz derecede hızlı bir şekilde girmesini sağlar. Çıkarıldıktan sonra etkinlikte hiçbir azalma oluşmaz.